


Test Rapide Antigénique

Coronavirus SARS-Cov-2

(prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé)

Test rapide par immunochromatographie pour la détection qualitative des antigènes spécifiques du SARS-COV-2.

- ✓ Sensibilité 96%
- ✓ Spécificité 100%
- ✓ Lecture 10 mn.

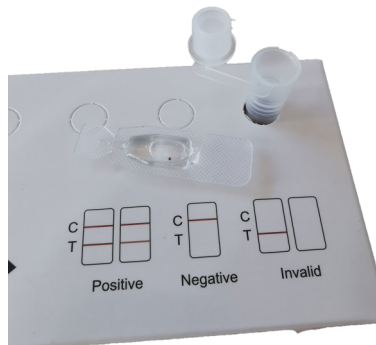

- ✓ Pack de 25 livrés en boîtes de 5
- ✓ Chaque test dispose de sa monodose
- ✓ Etui réversible pour simplifier les manipulations




Thierry SCHMITT
① +336 84 75 24 24
Action-Vitale.com

schmitt@action-vitale.com

Test Rapide Antigénique


Coronavirus SARS-Cov-2

(prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé)

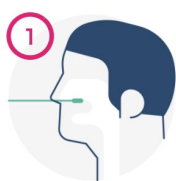

Écouvillon nasal

Insérer de 4cm et frotter la cloison nasale pendant 5 sec. dans chaque narine

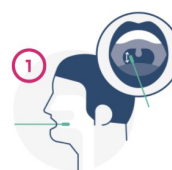

Écouvillon oro-pharyngé

Insérer dans la gorge sans toucher la langue et frotter pendant 5 sec.


OU




Ajouter 10 gouttes de solution dans le tube



Tourner l'écouvillon dans le tube de solution pendant 10s

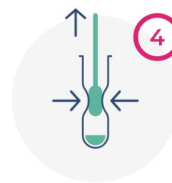


Ressortir l'écouvillon tout en pressant le tube pour récupérer le maximum de liquide

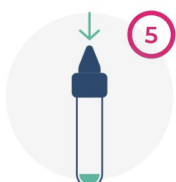

Insérer le bouchon dans le tube



Déposer 3 gouttes dans le puit 'S' du test

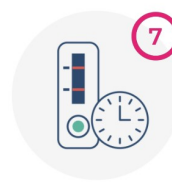

Lire le résultat entre 10 et 20 mins



Thierry SCHMITT
☎ +336 84 75 24 24
Action-Vitale.com